



Depi-BlonD[®]

New!!
Depilation
Effective !!



Concepto:

Depi-BlonD es un gel ligero que permite la fotodepilación en la mitad de tiempo.

Proceso:

Para un proceso efectivo, se deben seguir los siguientes pasos.

1°- Tras el proceso normal de rasurado que se hace en la zona a fotodepilar se aplica una pequeña cantidad de **Depi-BlonD** y se deja actuar 5-10 minutos, permitiendo que el activo se fije en el pelo dentro del folículo.

2°- Tras este tiempo se retira el gel sobrante con un papel o gasa.

Muy Importante:

- No se debe utilizar una toallita con producto limpiador ya que arrastraría parte del activo del pelo.
 - Esto es importante porque si en vez de utilizar papel o gasa para retirar el gel sobrante; se utiliza alguna toallita con producto limpiador, toda la piel quedará con producto, captará energía del láser de diodo o del IPL y la sensación de quemazón será más intensa.
- 3°- Se procede a realizar la fotodepilación normalmente



Depi-BlonD[®]



MODEL

Ventajas:

- Un tratamiento más rápido ahorra tiempo, aumenta la satisfacción del paciente y permite programar más sesiones de tratamiento por día.
 - Amplia la vida útil de los equipos, reduciendo la cantidad de energía requerida por sesión
 - Funciona con todas las tecnologías de depilación, que se encuentran disponibles en el mercado.
 - Es un producto apto para todo tipo de pieles, no presenta efectos secundarios.
 - Especialmente indicado para depilación a personas con pelo rubio o canoso.
 - En pelos oscuros se optimiza más la absorción de energía: con menos energía se puede depilar, lo que no produce tanto dolor en la zona a depilar.
 - Es muy apropiado en pieles muy morenas (Se sabe que se desaconseja depilar cuando la piel está muy morena porque aumenta el riesgo de quemadura)
- En pelos oscuros se optimiza más la absorción de energía: con menos energía se puede depilar, lo que no produce tanto dolor en la zona a depilar.

Aspectos a considerar:

- Si se aplica justo después de rasurar puede causar cierto escozor, sobre todo en pieles muy sensibles e irritables.



Depi-Blond[®]



Depi-BlonD Gel de aplicación rápida.

Para tratamientos de depilación en la mitad de tiempo

Depi-BlonD se basa en una fórmula tópica de luz, que mejora y maximiza la efectividad de la tecnología de depilación realizada con láser.

Utilizamos moderna nanotecnología, que permite que las moléculas del gel se unan con el cromóforo de melanina, lo que permite aumentar de forma significativa la absorción de energía dentro del folículo piloso.

El proceso del tratamiento es acelerado por la mayor absorción de energía, permitiendo lograr resultados más eficaces en la mitad de tiempo del tratamiento; ahorrando en el uso de energía por cada sesión de tratamiento.

Constituye un beneficio en el ahorro de tiempo y recursos de personal en la aplicación del tratamiento, además de en el consumo de energía.



Depi-BlonD[®]

Depi-BlonD gel ofrece una solución simple y completa para una depilación verdaderamente eficaz en un plazo reducido de tiempo; apto para todo tipo de pieles, pelo fino o grueso, y especialmente indicado para personas rubias, pelirrojas o con canas, donde existe dificultad para el depilado.

Depi-BlonD gel es sólo para uso externo; es necesario realizar una prueba cutánea antes del primer tratamiento para descartar cualquier reacción alérgica.

Beneficios / Ahorro

Mínimo de producto, máximo de optimización y eficacia

Mínimo de consumo de energía

Mitad de tiempo en el proceso de depilación

Permite una depilación efectiva en personas con pelos rubios, pelirrojos y canosos.

En pelos oscuros se optimiza más la absorción de energía, minimizando el dolor.



Depi-BlonD[®]



EL ALIADO IDEAL PARA CENTROS DE BELLEZA O CLINICAS ESPECIALIZADAS

Ahorro de tiempo, menos gasto y mayor beneficio

Depi-BlonD es un gel que permite realizar tratamientos rápidos de forma óptima y eficiente, permite la satisfacción del paciente con sesiones de tratamiento más cortas, además de que permite disponer de más tiempo útil para programar más tratamientos diarios.

Otra de las ventajas que ofrece **Depi-BlonD** gel, es el ahorro de energía en cada sesión, reduciendo el tiempo de tratamiento a la mitad de tiempo; esto permite aumentar la vida útil del aparato laser, permitiendo un menor consumo del diodo laser, reduciendo costes de mantenimiento del aparato y ahorrando electricidad.

Depi-BlonD[®]



Depi-BlonD gel se puede utilizar con todas las tecnologías de depilación disponibles en el mercado y se puede aplicar a todo tipo de piel. Es un producto adecuado y seguro para todo tipo de piel y no presenta efectos secundarios.

Depi-BlonD gel se suministra en envases 50 ml, en cajas de 20 unidades; 50 ml, son suficientes para realizar hasta 4 sesiones de tratamiento permitiendo la cobertura de grandes áreas de la piel.

Depi-BlonD gel se absorbe de forma eficaz por la melanina, mejorando la absorción del láser dentro de los folículos pilosos. Se reduce la energía total acumulada, permitiendo resultados excelentes en la mitad del tiempo.

Depi-BlonD gel permite el tratamiento adecuado para todo tipo de piel, es seguro y no tiene efectos secundarios.



Depi-BlonD[®]



Eficaz, Rápido, Ahorra Tiempo y Energía
Permite atender más tratamientos en un solo día!



Depi-BlonD[®]



Depi-BlonD®

Special Blondes

50 ml. 1,7 Fl. Oz.

Effective Waxing for Blondes



Depi-BlonD®



CONTACT ✓

Let's keep going:

If you are interested in developing our business, acting as an authorized distributor, contact us and we will be happy to provide more information.

Avancemos:

Si usted está interesado en el desarrollo de nuestro negocio, actuando como distribuidor autorizado, contacte con nosotros y estaremos encantados de ampliar información.

General Administration

✉ info.gargolahealthcare@tinet.org
info.gargolahealthcare@tinet.cat
gargolahealthcare@gmail.com

President

Dr. Pedro Serrano Aisa

✉ Corporate email: p.gargolahealthcare@tinet.org
Corporate email: p.gargolahealthcare@tinet.cat
General e-mail: gargolahealthcare@gmail.com

☎ +34 654 69 00 84

☎ p291005

skype telecardiologo

Departamento Comercial Nacional

✉ comercial.gargolahealthcare@tinet.org
comercial.gargolahealthcare@tinet.cat

☎ +34 666 782 262

Marketing Department / Social networks

Lic. Verónica Alicia Suárez Sandoval

✉ Corporate e-mail: va.gargolahealthcare@tinet.org
Corporate e-mail: va.gargolahealthcare@tinet.cat
General e-mail: gargolamarketing@gmail.com

☎ +34 653 06 18 33

Export Department Italia

Mr. Danielle Fioretto

✉ Corporate e-mail: sh.gargolahealthcare@tinet.org
Corporate e-mail: sh.gargolahealthcare@tinet.cat
General e-mail: dfioretto59@gmail.com

☎ +39 349 279 1058

Export Department Portugal

Mr. Eduardo Borges

✉ Corporate e-mail: eb.gargolahealthcare@tinet.org
Corporate e-mail: eb.gargolahealthcare@tinet.cat
General e-mail: borgesrod.eduardo@gmail.com

☎ +34 693 94 94 62



Depi-BlonD®

Follow us on



<https://webfacil.tinet.cat/gargolahealthcare>

<https://www.gargolahealthcare.com/>

International Commercial Department / Export Department

Mr. Julio Suárez Rodríguez

✉ General: jsimportexport@gmail.com
International: smcceo@tinet.cat
Spain: cortuhondo@tinet.cat
Ukraine: officeespucrania@tinet.cat



WhatsApp/WeChat/Inmo: +38 0631 890 840



wxid_v0n0oj6xrji822



Spain: +34 634 077 903
Ukraine / Viber: +38 662 377 523



juliosuarezrodriguez



<https://twitter.com/CORTUHONDO>



es.linkedin.com/pub/julio-suarez-rodriguez/30/533/8b4/

Страны Восточной Европы

Ukraine and Eastern European Countries Offices:

Ukraine Office:

Дядюн Александр Сергеевич
экспорт 1

☎ +380 66 0821 769

✉ dasimportexport17@gmail.com

Pavel Kryukov

экспорт 3

☎ +380 95 520 9708

✉ krukov80@gmail.com

Олексій Лукомський
экспорт 2

☎ +380 664 231 494

✉ kherson.trade@gmail.com

Vitalii Asaulenko

экспорт 4

☎ +380 99 722 1888

✉ vitaliy.importexport@gmail.com



Thanks for your attention!!
Gracias por su atención!!